


# Kit para la recolección de muestras nasales

PACC-ER Versión 1.0

Preguntas: Llame sin costo al 800-683-1992 o envíe un correo electrónico a [pacc@marshfieldresearch.org](mailto:pacc@marshfieldresearch.org).

## Cada kit contiene:

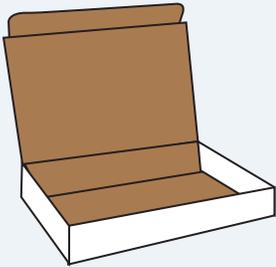


(1) Caja



(1) Sobre con el gasto del envío pagado




(1) Bolsa para riesgos biológicos

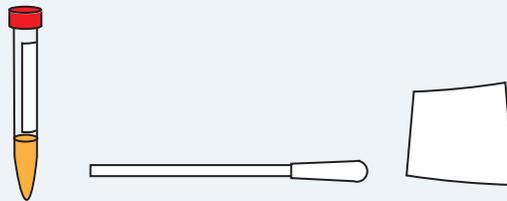

### Dentro de la bolsa para riesgos biológicos:

- (1) Tubo de recolección con un líquido
- (1) Bastoncito de algodón (hisopo) esterilizado que parece un Q-Tip largo
- (1) Papel absorbente

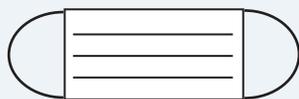


### Otros elementos necesarios:

- (1) Taza o vaso limpio
- (1) Bolígrafo o marcador de trazo fino
- (1) Mascarilla. Recomendamos ponerse una mascarilla si va a recolectar una muestra de otra persona.




**Información de seguridad:** Mantenga el kit fuera del alcance de los niños y las mascotas. NO beba el líquido del vial de recolección. En caso de ingestión, llame INMEDIATAMENTE a un médico.

1

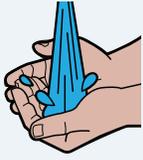

Lávese y séquese las manos antes de abrir el kit. Tome una taza o un vaso limpio y un bolígrafo.

4

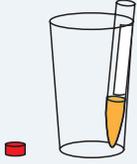


Quítele la tapa al tubo. Ponga el tubo en la taza o el vaso para que quede derecho.

7




Retire el bastoncito de la fosa nasal. Repita el paso 6 en la otra fosa nasal, usando el mismo bastoncito.

10

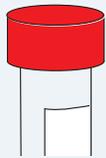

Enrosque nuevamente la tapa en el tubo para que cierre de forma hermética.

13

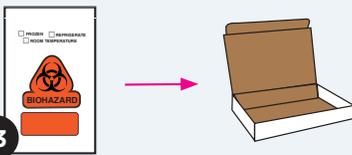

Ponga la bolsa para riesgos biológicos dentro de la caja. Cierre la caja.

2



Saque el bastoncito de algodón y el tubo de la bolsa para riesgos biológicos. Ponga los artículos sobre una superficie limpia y seca. **NO saque el papel absorbente de la bolsa.**

5




Abra el paquete del bastoncito de algodón. **NO toque la punta del bastoncito con los dedos ni deje que toque ninguna superficie.**

8



Ponga el bastoncito dentro del tubo **CON LA PUNTA HACIA ABAJO.**

11

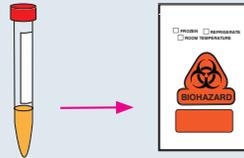

Ponga el tubo dentro de la bolsa para riesgos biológicos. Selle la bolsa; quite el exceso de aire de la bolsa poniéndola sobre la mesa y apretándola suavemente antes de sellarla.

14




Ponga la caja dentro del sobre para hacer el envío. Selle el sobre.

3




Escriba la fecha de recolección de la muestra en el exterior del vial.

6

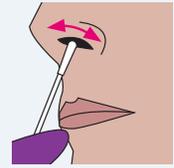


Inserte suavemente el bastoncito en la nariz hasta que no vea la punta. Haga rotar el bastoncito dentro de todo el interior de la fosa nasal al menos dos veces.

9

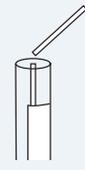


Encuentre el punto de quiebre en el palillo del bastoncito. Doble el palillo del bastoncito contra el borde del tubo en el punto de quiebre hasta que se separe. Bote la parte de arriba del palillo del bastoncito que usted tocó.

12

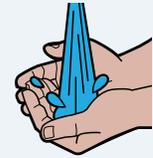

Lávese y séquese las manos otra vez.

15

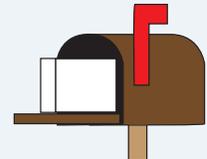

Envíe el kit por correo lo antes posible. **NO lo envíe por correo un domingo.**

