


Instrucciones para la recolección de muestras de heces

PACC-ER Versión 1.0

Preguntas: Llame sin costo al 800-683-1992 o envíe un correo electrónico a pacc@marshfieldresearch.org.

Cada kit contiene:

(1) Caja

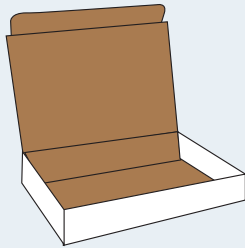


(1) Sobre de envío prepagado



(1) Guantes



(1) "Gorro" para el inodoro

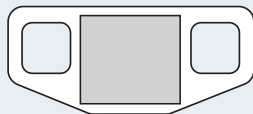


(3) Forros para pañales (si se solicitan)



(1) Bolsa de hielo





(1) Bolsa de riesgo biológico

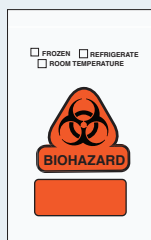

Dentro de la bolsa de riesgo biológico:

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- (1) Vial de recolección con líquido en el interior y cuchara en la tapa
- (1) Hoja absorbente

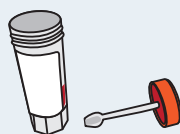

Otros artículos necesarios:

- (1) Bolígrafo



Información de seguridad:

Mantenga el kit fuera del alcance de los niños y las mascotas. NO beba el líquido del vial de recolección. En caso de ingestión, llame INMEDIATAMENTE a un médico.

Importante:

- Lea y siga las instrucciones antes de comenzar.
- **Haga esto ahora:** Saque la bolsa de hielo del kit y póngala en el congelador.
- **PRIMERA** evacuación después de recibir este kit: Recoja la muestra.




Marshfield Clinic
Research Institute

Instrucciones:


Para aquellas personas que usan pañales:

- ANTES de defecar: Coloque un forro de pañal (incluido en el kit) en el centro del pañal.
- Utilice un nuevo pañal y un nuevo forro si el participante orina sin defecar.
- Recoja una muestra de heces del pañal. Siga las instrucciones, pero omita los pasos 3-5 y 10. Deseche el pañal y el forro después de la recolección.


1. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón. Manos secas.

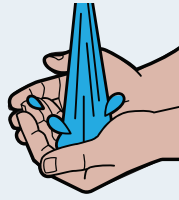


2. Saque el vial de recolección de la bolsa de riesgo biológico. Coloque el vial sobre una superficie limpia y seca en el baño. Deje la hoja absorbente EN LA BOLSA.

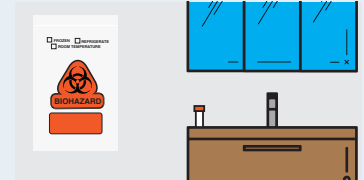

3. Retire el "gorro" para el inodoro del kit. Despegue el forro de papel del reverso de la cinta adhesiva de doble faz de los bordes exteriores del "gorro".

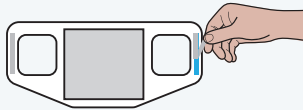

4. Coloque el "gorro" sobre el asiento del inodoro hacia la parte posterior de la taza, cerca del tanque.

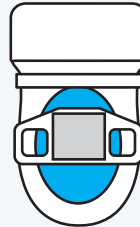

5. Expulse la deposición (muestra de heces) en el "gorro".




Procure no orinar sobre las heces.


6. Póngase los guantes. Abra el vial de recolección. Utilice la cuchara de la tapa del vial para transferir las heces al vial **hasta que el líquido alcance la línea roja**. Si es posible, tome muestras de varias zonas de las heces.



7. Vuelva a poner la tapa bien APRETADA y agite el tubo para mezclar.

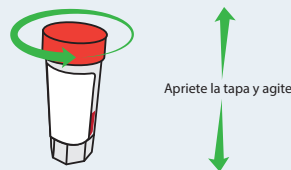


8. Escriba la fecha de recolección de la muestra en el exterior del vial.

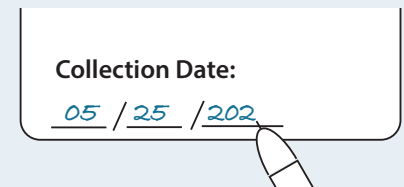


9. Coloque el vial en la bolsa de riesgo biológico. Retire la lengüeta adhesiva de la bolsa y doble la parte superior de la bolsa encima de la ranura.




10. Vacíe el "gorro" en el inodoro y tire la cadena para eliminar las heces y el papel higiénico. Deseche el "gorro". Tirar el "gorro" por el inodoro puede dañar el sistema de alcantarillado o provocar atascos en su casa.

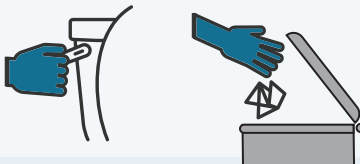


11. Quítese los guantes y descártelos.

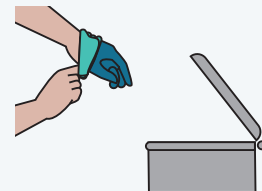


12. Lávese las manos minuciosamente con agua y jabón.

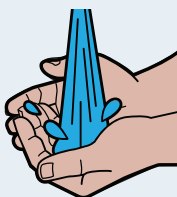

13. Envíe el kit por correo lo antes posible. NO envíe el kit por correo un domingo. Guarde el vial en el refrigerador y la bolsa de hielo en el congelador hasta su envío.

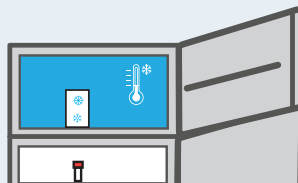

14. Cuando esté listo para enviar por correo, coloque la bolsa de hielo y la bolsa de riesgo biológico en la caja. Introduzca la caja en el sobre de envío prepagado. Cierre el sobre y envíelo por correo.

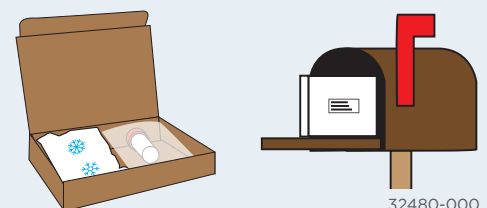

32480-000